

## GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Eine Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitung kann zu einer ernsthaften Reduktion der Effektivität dieser Atemschutzmaske und zu Krankheit, Verletzung oder sogar zum Tod führen. Die sorgfältige Beachtung dieser Anleitung ist ein wichtiger Schritt zur sicheren Nutzung der Atemschutzmaske.
2. Wie bei jeder Art von Maske muss der Träger/die Trägerin vor Gebrauch angemessen geschult werden. Vor Benutzung sollte der Träger/die Trägerin den einwandfreien Zustand der Maske (keine Verschmutzung, keine Beschädigung der Ohrbänder etc.) überprüfen.

### Einschränkungen

Verwenden Sie die Maske nicht oder verbleiben Sie nicht bzw. betreten Sie keinen kontaminierten Bereich unter folgenden Umständen:

- a. Die Atemluft enthält weniger als 19,5% Sauerstoff.
- b. Wenn Sie eine Kontamination riechen oder schmecken.
- c. Als Schutz gegen Gase oder Dämpfe.
- d. Kontaminationsstoffe oder deren Konzentration sind unbekannt oder stellen eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit dar.
- e. Für Sandstrahlarbeiten, Lackierarbeiten und Umgang mit Asbest.
- f. In explosiven Umgebungen.

### Sicherheitshinweise

1. Diese mit „NR“ markierte Maske darf nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden.
2. Ersetzen oder modifizieren Sie keine Teile und fügen sie keine Teile hinzu oder lassen Sie keine Teile der Maske weg, so wie sie vom Hersteller spezifiziert wurde.
3. Diese Maske hilft beim Schutz vor bestimmten Partikelverunreinigungen, aber eliminiert das Expositionsrisiko und das Risiko einer Ansteckung oder Infektion nicht vollständig.
4. Verwenden Sie diese Maske nicht mit Gesichtsbehaarung oder jeder anderen Bedingung, die einen guten Sitz der Maske verhindern könnte, da in diesem Fall die Dichtheitsanforderungen nicht erfüllt werden können.
5. Werfen Sie die Maske weg und ersetzen Sie die Maske durch eine neue, wenn:
  - a. die Maske in einer kontaminierten Umgebung abgenommen wird,
  - b. eine Verstopfung der Maske zu Atemschwierigkeiten führt,
  - c. die Maske beschädigt wird.

## TRAGEANLEITUNG

1. Geben Sie die Gesichtsmaske mit dem Nasenclip nach oben und der nicht beschrifteten Seite nach innen zeigend auf das Gesicht. Befestigen Sie die Ohrbänder an den Ohren.
2. Drücken Sie den Nasenclip vorsichtig, um diesen an die Form Ihres Nasenrückens anzupassen. Ziehen Sie dann das untere Ende der Maske über Ihren Unterkiefer, während Sie die Maske am Nasenclip gegen Ihren Nasenrücken drücken.
3. Passen Sie den Sitz der Maske für einen perfekten Schutzeffekt so an, dass der gesamte Gesichtsbereich vom Nasenrücken bis zum Unterkiefer gut geschützt ist.
4. Wiederholen Sie die Einpassung der Maske, bis Sie eine ordentliche Abdichtung erzielen.
5. Das Betreten eines kontaminierten Bereichs mit einer schlecht angepassten Maske kann Krankheit oder sogar den Tod zur Folge haben.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ATEMSCHUTZMASKE

**Produktleistung:** Großartige Filtereffizienz.

**Fasergewebeaufbau:** Spinnvlies und schmelzgeblasener Vliesstoff nicht gewebt.

**Gebrauch:** In Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug, Bus, Flugzeug etc.) und an allen öffentlichen Orten sowie im häuslichen Umfeld.

**Lagerung:** Lagern Sie die Maske in einem geschlossenen und vor kontaminierten Bereichen geschützten Behälter, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf. Nicht mit Wasser in Berührung bringen.



**Hersteller:** Shandong Daddy's Choice Health Science and Technology Co.Ltd

**Adresse:** Tiandingfeng road, Garden street, Economic Development Zone, Linyi County, 251500 Dezhou City, Shandong Province, China

**Importiert durch:** Care 1 solution GmbH & Co. KG, Hans Böckler Strasse 7, 63263 Neu-Isenburg, Germany

**Benannte Stelle:** Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.

**Adresse:** Necip Fazil Bulvari Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukari Dudullu Ümraniye – Istanbul, Türkei (NB 2163), [www.universalcert.com](http://www.universalcert.com)  
MADE IN CHINA

PSA der Kategorie III laut Verordnung (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009

**Herstellungsdatum/Chargennummer:** 2020/12/04 / 20201204

**Haltbarkeitsdauer:** 3 Jahre

**Telefon:** 0086 400-996-5015

**EU-Konformitätserklärung abrufbar unter:**

**Webseite:** [www.daddychoice.com.cn](http://www.daddychoice.com.cn)

**Email:** [sales@daddychoice.com](mailto:sales@daddychoice.com)

CE2163

FFP2 NR

Modell: T0001

Verordnung (EU) 2016/425

EN 149:2001+A1:2009